


# Ecotouch 3<sup>®</sup>

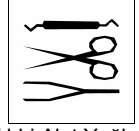

Tıbbi Alet Yağlayıcı

## Kullanıma Hazır Solüsyon Tıbbi Alet Yağlayıcı

### Ecotouch 3

Ecotouch 3 tüm paslanmaz çelik ve metal tıbbi aletlerin, ekipmanların yüzeylerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak paslanma ve sürtünmeyi önleyici antikorozyf özellikli bir bakım ürünüdür. Aletlerin oynar kısımlarındaki hareket kabiliyetini artırır, yüzeylere parlaklık verir. Rutin bakımlarda kullanılması sonucunda aletlerin ömrünü uzatır. Durulama gerektirmez. Ecotouch 3 otoklavda buhar geçirebilen özelliktedir, sararma yapmaz.

### Kullanım Alanları

Paslanmaz çelik ve metalden üretilmiş tüm alet ve cihazlarda (MIC, cerrahi, dişçilik aletleri) kullanıma uygundur.

### Kullanım Şekilleri

Kullanıma hazır çözüldür. Temizliği yapılmış aletlerin oynar kısımlarına tüm yüzeyleri temas edecek şekilde 10 cm uzaklıktan püskürtünüz. Çözelti ile ıslanan aletleri kurumaya bırakınız. Bu işlem sonrasında tıbbi aletler otoklava atılabilir.

### Ecotouch 3 İçerisinde

Tıbbi parafin, emülgatörler, antikorozyf maddeler, stabilizör

### Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Görüntü	: Beyaz çözelti
Yoğunluk	: 20°C'de 1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH	: 6 -/+ 0,5

### Ambalaj Bilgileri

1 x 160 mL	HDPE bidonlarda
1 x 1000 mL	HDPE bidonlarda

### UYARILAR / ÖNLEMLER

- Yutmayınız!
- Göz ile temasını önleyiniz.
- Çalışma esnasında uygun koruyucu eldiven ve kıyafet giyiniz.
- Kazalarda ve rahatsızlık durumunda tıbbi müdahaleye başvurunuz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
- Zehirlenme durumunda "Ulusal Zehir Merkezinin" ücretsiz 114 numaralı telefonunu arayınız.

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 2 yıldır.